

SATURS

I. ROKASGRĀMATA

1. Tehniskā informācija	3
1.1 Aparāta komplektācija	3
1.2 Aparāta tehniskie dati	3
1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas	4
1.4 Uzstādīšana/pieslēgšana un aksesuāri	5
1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi	5
1.6 Sterilizācija/dezinfekcijas	6
1.7 Uzturēšana un kopšana	6

II. GARANTIJA

2. Garantijas pienākumi	7
2.1 Vispārīgie noteikumi	7
2.2 Ražotāja garantija	7
2.3 Garantijas talons	8
2.4 Piegādes nosacījumi	9
2.5 Informācija par iespējamiem utilizācijas veidiem	9
2.6 Pārstāvniecības	9

1. Tehniskā informācija

1.1 Aparāta komplektācija

1.	Aparāts PR-2000	1 gab.
2.	Strāvas vads	1 gab.
3.	Pressoterapijas uzvalks (48 kanāli)	1 gab.
4.	Piepūšamās caurules	5 gab.
5.	Lietošanas instrukcija	1 gab.
6.	Transportēšanas iepakojums	1 gab.

1.2 Aparāta tehniskie dati

Ierīces funkcija	spiediena terapijas
Spiediena jauda	120-240 mm Hg
Sūkņa laiks	6-10 sec
Apstrādes zonas 48 kanāli	48 kanāli (48 Drošības spilveni)
Presoterapijas programmas	5 iepriekš programmēti režīmi
Vadības panela	spiedpogas saskarne
<i>Tīkla parametri</i>	
Barošanas avots	220-240 V / 50 Hz; 100-120 V / 60 Hz
Ieejas jauda	115 W
<i>Drošība</i>	
Aizsardzības klase	IP31
<i>Dimensija</i>	
Neto izmēri (W*L*H)	470*610*1050 mm
Neto svars	31 kg

1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas



Galvenās aparātas sastāvdaļas, kā parādīts iepriekš:

1. Galvenā vienība PR-2000;
2. Pressoterapijas uzvalks (48 gaisa kanāls);
3. Piepūšamās caurules;
4. Strāvas vads.

1.4 Uzstādīšana/pieslēgšana un aksesuāri

Lai instalētu PR-2000 aparātu, rīkojieties šādi:

1. Savienojiet aparātu ar elektrotīklu, izmantojot strāvas vadu.
2. Pievienojiet spiediena terapijas uzvalks piepūšamās caurules savienotājiem uz kostīmu aprocas ar atbilstošiem numuriem. Lai savienotu gaisa padeves sistēmu no ierīces ar presoterapijas uzvalku, izmantojiet piepūšamo cauruļu savienotājkabeļus. Kabeļiem nr. 1; 2; 3; 4; 5 ir pievienoti savienotāji nr.1; 2; 3; 4; 5 uz aizmugurējā paneļa ierīces un kabeļiem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ir pievienoti savienotāji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J savienojuma kabeļi pressoterapijas uzvalks.
3. Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir stingri uzstādīti un uzvalks ir hermētisks (neļauj gaisam).
4. Ieslēdziet ierīci, nospiežot strāvas slēdzi ierīces aizmugurē



5. Izvēlieties vienu no trim jomām:

-Rokas – “ARM” (P1);

-Viduklis – “WAIST” (P2);

-Kājas. – “LEG” (P3);

6. Izvēlieties vienu no piecām programmām uz ierīces vadības paneļa interfeisu, kas atbilst šo fizisko stāvokli **klients**, izmantojot "SELECT MODE" pogu: uzlabot asinsriti - maiga režīmā (M1), limfodrenāžas masāža (M2), novērst tūsku un zaudēt svaru (M3), paātrinātu svara zaudēšanas programma (M4), limfodrenāžas paātrināta masāža (M5), 7. Iestatiet seansas laiku. Izmantojiet "TIME" regulatoru.

8. Iestatiet intensitātes līmeni (sūknēšana). Izmantojiet "INTENSITY " pogu uz vadības paneļa;

9. Tagad aparāta ir gatavs izmantošanai;

10. Nospiediet "START / PAUSE" pogu, lai sāktu seansu.

1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi

1. Lūdzu, pievienojiet pressoterapijas uzvalku, kad aparāts ir izslēgts!

2. Pievienojiet / atvienojiet katru ierīces vadu, turot vadu pie pamatnes savienojuma / atvienošanas vietā.

3. **Aizliegts noslaucīt ierīces akrila daļas ar spirtu saturošiem šķidrumiem vai mazgāšanas līdzekļiem.**

4. Neļaujiet ierīcei un tās piederumiem nokrist.

5. Neuzstādiet pie siltuma avotiem. Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem.

6. Neļaujiet šķidrumiem, želejām utt. sip uz handpiece vai ieejas savienotāji aparātas.

7. Darbības laikā, saglabāt brīvo spriedzi handpiece vadiem.

Izvairieties lieces vadus.

8. Pirms un pēc manipulācijām jādezinficē ierīces daļas, kas nonāk saskarē ar klientu ķermeni (apstrādes roktura gals).

9. Veiciet seansu tikai ar nepieciešamajiem ādas kopšanas līdzekļiem, kas ražoti šāda veida seansai.

10. Lai veiktu seansas ar šo vienību, klientuam vienmēr ir jābūt vienreizējai seansai.

11. Ir aizliegts labot un uzturēt ierīci ārpus pilnvarotajiem servisa centriem.
 12. Pēc transportēšanas zemā temperatūrā pirms darbības uzsākšanas ierīce jāuzglabā vismaz 3 stundas temperatūrā no + 10 līdz + 35 ° C.
 13. Ir aizliegts izmantot darba rīkus, kas nav iekļauti iepakojuma saturā.
 14. Nedarbiniet ierīci ar bojātu korpusu, kabeli un piederumiem.
 15. Ierīce ir paredzēta 8 stundu nepārtrauktai darbībai dienā. Ja tiek pārsniegts norādītais nepārtrauktais darbības laiks, tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus (vakuuma sūkņa pārkaršana).
- Tādēļ pēc katras sesijas ir nepieciešams izslēgt ierīci vismaz 20 minūtes un piešķirt tai pagaidu pārtraukumu no darba.
16. Neuzsāciet sesiju bez darba piederumu pirmās tīrīšanas.
 17. Neuzsāciet sesiju ar klientu, ja viņam ir nosliece uz kādu no kontrindikācijām ierīces lietošanai.
 18. Tikai speciāli apmācīts personāls ir atļauts veikt presoterapijas sesijas.

1.6 Sterilizācija/dezinfekcija

1. Ierīces daļas, kas saskaras ar klientu korpusu (stikla elektrodi), pirms seansas jādezinficē.
2. Dezinficējiet elektrodus ar mīkstu kokvilnas audumu, kas iemērc etilspirtā.

1.7 Uzturēšana un kopšana

1. Tīrot ierīces virsmu, noslaukiet to ar mīkstu kokvilnas audumu, kas samitrināts ar ūdeni vai ziepjūdeni. **Nelietojiet šķidrumus un šķidrums, kas satur hlora vai spirta sastāvdaļas.**
2. Regulāri notīriet apstrādes telpu, lai izvairītos no ierīces putekļošanas un piesārņošanas, kas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
3. Pirms darbības pārļiecinieties, ka vadiem, darba piederumiem un ierīces korpusam nav mehānisku bojājumu un darba piederumu pareiza pieslēgšana.
4. Ja nepieciešams, kalibrējiet ekrānu, atkārtoti nospiežot tukšo vietu ekrānā, kad aparāta ir ieslēgta. Tā rezultātā ekrānā parādīsies zils kalibrēšanas režīma logs, kurā ekrāna stūros pārmaiņus jānoklikšķina uz krustojumiem. Pēc tam kalibrēšana tiks pabeigta.

Gadījumā, ja radusies jebkuru defektu, ieteicam nekavējoties pārtraukt ierīces lietošanu un sazināties ar ar klientu apkalpošanas centru.

2. Garantijas pienākumi

2.1 Vispārīgie noteikumi

Šī garantija ir derīga tikai tad, ja garantijas talons ir pareizi aizpildīts – pārdēvēja zīmogs un pārdošanas datums. Garantijas laiks izstrādājumi skaitāms no pirkuma datuma. Garantijas nosacījumi ir spēkā saskaņā ar Likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību", reglamentē tās valsts tiesību aktiem, un tie nekādā veidā neietekmē ierobežo patērētāju tiesības. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētajos apstākļos.

Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteikta garantija.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

- ja prece tiek izmantota mērķiem, kuriem ražotājs vai piegādātājs garantiju nav paredzējis;
- ja prece tiek izmantota, neievērojot instrukcijā norādītos brīdinājumus vai mērķiem, kam tā nav paredzēta;
- ja uz preces ir redzamas patstāvīgi veikta remonta pazīmes vai ir veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
- ja ir mainīts, dzēsts vai nav nosakāms preces sērijas numurs;
- ja precei ir ārējās ietekmes izraisīti bojājumi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījis pats klients, stihiska nelaime, ugunsgrēks, sabiedriskie faktori, neparedzēti ārējie apstākļi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, ko izraisījusi nestandarta un sliktas kvalitātes materiālu, rezerves daļu, piederumu un aksesuāru izmantošana.

Garantija neattiecas uz trūkumiem (defektu) izstrādājumi, ko izraisa šādu iemeslu dēļ: dabīgo nolietojumu dēļ daļam, kurām ir ierobežots kalpošanas laiks, kā arī palīgmateriālu (baterijas, cimdi mikrostrāvas, aproce presoterapijas un tā tālāk), bojājumiem, kas ir radušies nepareizi vai pavirši lietošanu, uzglabāšanu, apkopi, iekārtu, darbību un ļaunprātīgi vai nepareizi montāžu, ja prece tika izmantota neparedzētajos apstākļos;

Garantijas apkalpošana neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti;

Ja ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;

2.2 Ražotāja Garantija

Ražotāja garantija attiecas, ja tas atbilst noteikumiem un nosacījumiem, ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

1. Garantija 18 mēnešiem attiecas tikai uz iekšējo komplektācijā aparātu;
2. Garantija 6 mēneši attiecas tikai uz uzaļa un ārējie piederumi (izņemot atrinolietajamas daļas un palīgmateriālu).

2.3 Garantijas talons

Ražotājs: **ALVI Praha s.r.o.**

TM ALVI Prague

Sērija: **Cosmi**

Modelis: PR-2000

Pārdošanas datums: _____

Pārdevējs: _____

Pārdevēja paraksts: _____

Izstrādājums ir pārbaudīts, bojājumu nav.

Ar instrukcijām un ekspluatācijas noteikumiem iepazīstināts
un piekrītu tiem.

Pircēja parakstu: _____

Zīmes servisa centri:

Datums servisa apkopes:	Akta numurs par remontu:	Paraksts/Zīmogs:

2.4 Piegādes noteikumi

Piegāde un nosūtīšana no garantijas centra notiek uz pircēja rēķina.

2.5 Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem

Ar kosmetoloģijas aparātiem nav tā sastāvdaļas, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un piesārņo vidi.

Pēc ekspluatācijas termiņa beigām tās var pārstrādāt bez īpašas metodes pārstrādi.

Komplektējošie izstrādājumi (čipsi, rezistori, kondensatori un tā tālāk), kas pēc ekspluatācijas termiņa ir работоспособными, var izmantot kā rezerves daļas, rezerves daļas, lai veiktu remontu šādu un līdzīgu aparātu.

2.6 Pārstāvniecības

Valsts:	Adrese:	Telefons:
Čehija	Prague 5, Štefánikova 18/25 15000	+420 (228) 880691
Ukraina	Kijevā, v Jeļenas Телиги, 5-В	+38 (068) 568 83 66 0 (800) 33 98 14
Krievija	Maskavas, Rjazaņas rp t, tālāk 10, lapa 2	+7 (800) 250 5459
Latvija	Rīga, Madonas iela 21-85	+371 (2) 212 1543