

SATURS

I. ROKASGRĀMATA

1. Tehniskā informācija	3
1.1 Aparāta komplektācija	3
1.2 Aparāta tehniskie dati	3
1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas	4
1.4 Uztādīšana/pieslēgšana un aksesuāri	4
1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi	5
1.6 Sterilizācija/dezinfekcijas	7
1.7 Uzturēšana un kopšana	7

II. GARANTĪJA

2. Garantijas pienākumi	8
2.1 Vispārīgie noteikumi	8
2.2 Ražotāja garantija	9
2.3 Piegādes nosacījumi	9
2.4 Informācija par iespējamām utilizācijas veidiem	9
2.5 Pārstāvniecības	9

1. Tehniskā informācija

1.1 Aparāta komplektācija

1.	Aparāt T-17	1 gab.
2.	Strāvas vads	1 gab.
3.	Manipula vakuuma hidropielēšanai ar dimanta mikrodermabrāziju	1 gab.
4.	Seruma caurule	1 gab.
5.	Atlikuša šķidruma izvads	1 gab.
6.	Komplekts dimanta mikrodermabrāzijai	1 komplekts
7.	Tvertne atlikušā šķidruma savākšanai	1 gab.
8.	Atslēga ciklona filtra trauka noņemšanai	1 gab.
9.	Lietotāja rokasgrāmata	1 gab.
Paligmateriāli		
10.	Vāciņi ar caurumiem darbam ar ādu	5 gab.
11.	Vāciņš bez atveres	1 gab.
12.	O-gredzens rokturim	50 gab.
13.	O-gredzens atlikušā šķidruma tvertnei	3 gab.
14.	Kosmētikas / tīrīšanas līdzeklis	12 gab. / 12 gab.

1.2 Aparāta tehniskie dati

Mašīnas funkcijas	vakuuma hidropielēšana ar dimanta mikrodermabrāziju
Šķidruma plūsma	2,62 ml / s
Maksimālais vakuuma spiediens ir	3,5-66,75 cm Hg. Art.
Barošanas spriegums	220-240 V
Frekvence elektrotīklu	50 Hz; 60 Hz
Jaudas patēriņš	45 W
Aizsardzības klase	IP31
Gabarīta izmēri aparāta	315 mm*275 mm*360 mm
Svars (neto)	6,3 kg

1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas



Attēlā, kas paredzēts iepriekš parādot šādas galvenās sastāvdaļas aparāta:

1. Izskats aparāta T-17;
2. Manipula ar mēģenēm seruma padevei un atlikuma šķidruma novadīšanai;
3. Akрила plauktu turētājs manipulācijām;
4. Cikloniskais filtrs;
5. Kontainers šķidruma atkritumu savākšanai;
6. Sprauslas dimanta mikrodermabrāzijai;
7. Kosmētikas līdzekļi;
8. Strāvas vads;
9. Lietotāja rokasgrāmata.

1.4 Uzstādīšana/pieslēgšana iekārtas un piederumi

Lai uzstādītu aparāta T-17, nepieciešams veikt darbības zemāk aprakstītajā secībā:

1. Izpakojiet mašīnu un pārbaudiet, vai visas detaļas ir iekļautas komplektā.
2. Novietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas.
3. Lai izvairītos no sistēmas bojājumiem no augsta mitruma vai zemas temperatūras, kas var rasties transportēšanas laikā, vienu dienu atstājiet ierīci telpā, kuras fiksētais mitrums nepārsniedz 65% un temperatūru no +10 ° C līdz +40 ° C .
4. Pievienojiet strāvas vadu attiecīgajam savienotājam iekārtas aizmugurē.
5. Pievienojiet rokas instrumenta kabeli, seruma mēģeni un atlikušo šķidruma mēģeni, cieši ievietojot tos atbilstošajos savienotājos ierīces aizmugurē.
6. Izvēlieties procedūrai piemērotu rokturi un pievienojiet to rokturi.
7. Pievienojiet atkritumu šķidruma savākšanas tvertni attiecīgajai kontaktligzdai ierīces apakšā.
8. Atveriet trauku ar procedūrai nepieciešamo šķidrumu (serumu) un pievienojiet to atbilstošajam savienotājam ierīces apakšējā panelī.
9. Ieslēdziet ierīces strāvu, nospiežot ierīces aizmugurē esošo slēdzi pozīcijā "I".

10. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot barošanas pogu iekārtas priekšpusē.

Lietotājs var iestatīt procedūrai nepieciešamās parametru vērtības, izmantojot šādas vadīklas:

“Fluid” - regulators vajadzīgās sūkļu patēriņa vērtības iestatīšanai;

“Pressure/Spiediens” - regulators vajadzīgās vakuuma spiediena vērtības iestatīšanai;

“Timer/Taimeris” - lauks procedūras laika iestatīšanai, izmantojot atbilstošās pogas “↑ ↓”.

11. Ierīces saskarnē iestatiet seruma plūsmas ātrumu un vakuuma spiedienu. Novietojiet īkšķi virs vakuuma stiprinājuma vāka. Nospiediet START / STOP pogu, tiklīdz serums sāk plūst caur cauruli, lai pielāgotu plūsmas ātrumu un vakuuma līmeni.

12. Turiet pirkstu uz rokas, līdz sistēma ir piepildīta ar šķidrumu. Pēc aizpildīšanas jūs varat sākt procedūru.

13. Tvertnes uzpildīšanas gadījumā šķidruma atlikumu savākšanai ierīce pārtrauks darboties. Lai turpinātu darbu ar ierīci, ir nepieciešams iztukšot trauku, lai savāktu atlikušo šķidrumu.

UZMANĪBU. Pārvietojot ierīci vai to nelietojot, roktura galam jābūt pārklātam ar aizsargvāciņu, lai izvairītos no piesārņošanas.

14. Pēc norādīto iestatījumu veikšanas ierīce ir gatava lietošanai. Lai sāktu / apturētu kosmētisko procedūru, nospiediet pogu START / STOP.

1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi

Darbības noteikumi:

1. Ierīce jānovieto iekštelpās uz līdzenas, stabilas virsmas istabas temperatūrā 10–40 ° C. Ierīce jāatrodas vietā ar pietiekamu ventilāciju, prom no siltumu izstarojošām ierīcēm. Uztādiet ierīci tā, lai ierīces ventilācijas atverēs nebūtu nekādu šķēršļu, lai uzturētu gaisa plūsmu, lai izvairītos no pārkaršanas. Telpa jātur tīra;

DARBĪBAS PIEZĪMES!

Nēļaujiet ierīces apakšējā panelī izvietoto ciklona filtru piepildīt virs tā maksimāli pieļaujamā uzpildes sarkanās atzīmes (1. pozīcija labajā attēlā)! Kad kondensāts uzkrājas, notīriet ciklona filtru - atbrīvojiet spiedienu caur ciklona filtra drenāžu un šādā veidā iztukšojiet kondensātu, ar ierīces komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet kondensāta savākšanas krūzīti un noskalojiet zem tekoša ūdens, atkal ievietojiet tasi. **Veiciet ciklona filtra tīrīšanas procedūru, pilnībā atvienojot ierīci no tīkla!**



2. Pievienojiet manipulu TIKAI tad, kad ierīce ir izslēgta.

3. Pēc vajadzības notīriet ierīci ar mīkstu, tīru drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni vai ziepjūdeni.

Neslaukiet aparāta akrila daļas ar šķidrumiem vai mazgāšanas līdzekļiem, kuri satur alkohols.

4. Nomainiet manipulas stiprinājumus ar izslēgtu ierīci.

5. Nenometiet ierīci un tās piederumus.

6. Nenovietojiet ierīci siltuma avotu tuvumā un turiet to prom no tiešiem saules stariem.

7. Novērsiet šķidrumu, eļļu utt. Iekļūšanu savienojuma savienotājos un ierīces korpusā. Neļaujiet ūdenim, dezinfekcijas līdzekļiem vai jebkura cita veida agresīviem, kodīgiem, viegli uzliesmojošiem līdzekļiem iekļūt ierīces korpusa vai savienojošās caurules gaisa spraugās.

8. Strādājot klienta tuvumā, brīvi turiet savienozošo cauruli spriedzē.

9. Veiciet procedūras tikai ar kosmētikas līdzekļiem, kas paredzēti šai procedūrai un ar atbilstošu kvalitāti. Šajā procedūrā ir aizliegts izmantot kosmētikas gēla/želejas formas, to lietošana var izraisīt ierīces nepareizu darbību.

10. Ierīces darba ilgums ir paredzēts līdz 8 darba stundām dienā. Pārslodzes gadījumā tas var izraisīt produkta nepareizu darbību (sūkņa pārkaršanu), tādēļ pēc katras sesijas izslēdziet ierīci vismaz uz 20 minūtēm un dodiet tai īslaicīgu darbības pārtraukumu.

11. Lai notīrītu visu ierīces sistēmu, ir jāpievieno trauks ar īpašu tīrīšanai paredzētu sterilizācijas šķīdumu, aizveriet rokas instrumentu ar uzgali bez cauruma un ieslēdziet sistēmu ar maksimālu vakuumu un maksimālu šķidruma padevi.

AlviPrague iesaka ierīci apkalpot pilnvarotā servisa centrā, un, ja apkalpošana tiek veikta neatļautā servisa centrā, pircējs zaudē ierīces garantiju. Apkope jāveic ik pēc 6 mēnešiem.

Apkope ietver:

- pilnīga aparāta skalošana;
- sistēmu darbības diagnostika.

Aparāta T-17 pašapkalpošanās ietver:

- ciklona filtra tīrīšana;
- ierīces tīrīšana - ierīces ārējās daļas var notīrīt ar mīkstu, mitru sūkli. Ir iespējams izmantot arī vieglu tīrīšanas līdzekli. Izvairieties no šķidruma iekļūšanas ierīces iekšpusē;
- drošinātāja nomaiņa, ja nepieciešams.

Drošības pasākumi

Ierīcei nepieciešama īpaša apstrāde un piesardzība. Šo ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir apguvušas nepieciešamo apmācību, ņemot vērā lietošanas instrukcijas, un kuras pārzina tās terapeitisko iedarbību un iespējamos riskus.

Klientu drošība

Klienta drošība ir atkarīga no personāla kvalifikācijas, piemērotu procedūras apstākļu pieejamības, pareizi veiktas konsultācijas, rūpīgas klienta stāvokļa analīzes, kā arī no procedūras kontrindikāciju klātbūtnes.

Piesardzības pasākumi

1. Aparāta darba temperatūra ir 10–40 ° C, temperatūrā, kas zemāka par 10 ° C, ir grūti iedarbināt aparātu, un virs 40 ° C saīsina tā kalpošanas laiku.

2. Ierīces barošanas spriegumam jāatbilst spriegumam, kas norādīts tehniskajās specifikācijās.

3. Transportēšanas laikā neapgāžiet ierīci.

4. Darba laikā neļaujiet mašīnai brīvi pārvietoties.

5. Nesāciet vai nepārtrauciet aparāta darbību nekavējoties, vēlamais intervāls starp sākšanu un pauzi ir 5 minūtes. Ja ierīces kompresors tiek iedarbināts smagi (ierīces skaņa mainīsies uz zemākiem toņiem), atveriet roktura vāciņu, lai atbrīvotu spiedienu no sistēmas, tādējādi ļaujot kompresoram paātrināties, un pēc tam jūs varat turpināt strādāt normālā stāvoklī. režīmā.

6. Izmantojot trešo personu piederumus, nevis tos, kas ir ierīces komplektācijā, var izraisīt produkta nepareizu darbību vai nepareizu darbību.

7. Ierīces iesūktais gaiss kalpo arī dzesēšanai. Nenovietojiet ierīci sildītāju tuvumā.

1.6 Sterilizācija/dezinfekcija

1. Uzgaļi ir apstrādāmi ar līdzekli, kas neizraisa metālu koroziju, optimālais laiks uzgaļu sterilizācijai līdz 5 minūtes.

2. Nedrīkst lietot dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hloru (dezinfekcijai ir atļauts izmantot 20% hlorheksidīna šķīdumu), uzgaļus var sterilizēt ar autoklāvu vai ultraskaņas tīrīšanu.

1.7 Uzturēšana un kopšana

1. Aparātu virsmastīrīšanai, noslaukiet to ar mīkstu kokvilnas drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni vai ziepjūdeni.

2. Pagriežiet regulatorus, ar mērenu intensitāti.

3. Pavadīt regulāru telpās uzkopšanu, lai izvairītos no putekļiem, kas var novest pie izejas no aparāta darba stāvokļa.

4. Pirms darbu uzsākšanas, pārliedziniet, ka tajā nav mehānisku bojājumu, vadi, ultraskaņas manipulas, aparātu korpusa un pareizību savienojumu ultraskaņas manipulas.

Gadījumā, ja radusies jebkuru defektu, ieteicam nekavējoties pārtraukt ierīces lietošanu un sazināties ar ar klientu apkalpošanas centru.

5. Pirms darba sākšanas pārbaudiet ciklona filtra uzpildes līmeni, ja nepieciešams, notīriet to, pārliedziniet, vai nav mehānisku bojājumu vadiem, rokas instrumentam, caurules integritātei, ierīces korpusam un pareizajam savienojumam. . Ja tā ir bojāta, lūdziet izplatītājam nomainīt vai salabot bojāto daļu.

6. Uzstādot atlikušā šķidrums tvertni pēc tā tīrīšanas, pārliedziniet, ka O-gredzens cieši pieguļ malai vītnes sākumā un, ieskrūvējot, neizkropļojas. Nepareizas tvertnes uzstādīšanas gadījumā darbības laikā ierīce neradīs vakuumu sistēmas noplūdes dēļ.

7. Periodiski ir nepieciešams ieeļļot O gredzenu ar vazelīnu, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku.

8. Pēc katras procedūras ir nepieciešams notīrīt sistēmu no seruma atlikumiem un svešām daļiņām. Lai notīrītu visu ierīces sistēmu, ir jāpievieno trauks ar īpašu tīrīšanai paredzētu sterilizācijas šķīdumu, aizveriet rokas instrumentu ar uzgaļi bez

cauruma un ieslēdziet sistēmu ar maksimālu vakuumu un maksimālu šķidruma daudzumu. Atskrūvējiet un izskalojiet šķidruma paliekas trauku un pēc tam nomainiet to.

9. Pārvadājot ierīci vai to nelietojot, rokas instrumenta gals ir jāaizver ar vāciņu bez cauruma, lai izvairītos no piesārņojuma.

2. Garantijas pienākumi

2.1 Vispārīgie noteikumi

Šī garantija ir derīga tikai tad, ja garantijas talons ir pareizi aizpildīts – pārdēvēja zīmogs un pārdošanas datums. Garantijas laiks izstrādājumi skaitāms no pirkuma datuma. Garantijas nosacījumi ir spēkā saskaņā ar Likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību", reglamentē tās valsts tiesību aktiem, un tie nekādā veidā neietekmē ierobežo patērētāju tiesības. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētajos apstākļos.

Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteikta garantija.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

- ja prece tiek izmantota mērķiem, kuriem ražotājs vai piegādātājs garantiju nav paredzējis;

- ja prece tiek izmantota, neievērojot instrukcijā norādītos brīdinājumus vai mērķiem, kam tā nav paredzēta;

- ja uz preces ir redzamas patstāvīgi veikta remonta pazīmes vai ir veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;

- ja ir mainīts, dzēsts vai nav nosakāms preces sērijas numurs;

- ja precei ir ārējās ietekmes izraisīti bojājumi;

- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījis pats klients, stihiska nelaime, ugunsgrēks, sabiedriskie faktori, neparedzēti ārējie apstākļi;

- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, ko izraisījusi nestandarta un sliktas kvalitātes materiālu, rezerves daļu, piederumu un aksesuāru izmantošana.

Garantija neattiecas uz trūkumiem (defektu) izstrādājumi, ko izraisa šādu iemeslu dēļ:

dabīgo nolietojumu dēļ daļam, kurām ir ierobežots kalpošanas laiks, kā arī palīgmateriālu (baterijas, cimdi mikrostrāvas, aprobe presoterapijas un tā tālāk), bojājumiem, kas ir radušies nepareizi vai pavirši lietošanu, uzglabāšanu, apkopi,

iekārtu, darbību un ļaunprātīgi vai nepareizi montāžu, ja prece tika izmantota neparedzētajos apstākļos;

Garantijas apkalpošana neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti;

Ja ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums.

2.2 Ražotāja Garantija

Ražotāja garantija attiecas, ja tas atbilst noteikumiem un nosacījumiem, ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

1. Garantija 18 mēnešiem attiecas tikai uz iekšējo komplektācijā aparātu.

2. Garantija 6 mēneši attiecas tikai uz uzgaļa un ārējie piederumi (izņemot atrinolietojamas daļas un palīgmateriālu).

2.3 Piegādes noteikumi

Piegāde un nosūtīšana no garantijas centra notiek uz pircēja rēķina.

2.4 Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem

Ar kosmetoloģijas aparātiem nav tā sastāvdaļas, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un piesārņo vidi.

Pēc ekspluatācijas termiņa beigām tās var pārstrādāt bez īpašas metodes pārstrādi.

Komplektējošie izstrādājumi (čipsi, rezistori, kondensatori un tā tālāk), kas pēc ekspluatācijas termiņa ir работоспособными, var izmantot kā rezerves daļas, rezerves daļas, lai veiktu remontu šādu un līdzīgu aparātu.

2.5 Pārstāvniecības

Valsts:	Adrese:	Telefons:
Čehija	Prague 5, Štefánikova 18/25 15000	+420 (228) 880691
Ukraina	Kijevā, v Jeļenas Tenigi, 5-B	+38 (068) 568 83 66 0 (800) 33 98 14
Krievija	Maskavas, Rjazaņas rp t, tālāk 10, lapa 2	+7 (800) 250 5459
Latvija	Rīga, Madonas iela 21, ofis 85	+371 (2) 212 1543