

SATURS

I. ROKASGRĀMATA

1. Tehniskā informācija	3
1.1 Aparāta komplektācija	3
1.2 Aparāta tehniskie dati	3
1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas	4
1.4 Uztādīšana/pieslēgšana un aksesuāri	5
1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi	5
1.6 Sterilizācija/dezinfekcijas	7
1.7 Uzturēšana un kopšana	7

II. GARANTIJA

2. Garantijas pienākumi	8
2.1 Vispārīgie noteikumi	8
2.2 Ražotāja garantija	8
2.3 Piegādes nosacījumi	9
2.4 Informācija par iespējamiem utilizācijas veidiem	9
2.5 Pārstāvniecības	9

1. Tehniskā informācija

1.1 Aparāta komplektācija

1.	Aparāts PX-4000+	1 gab.
2.	Strāvas vads	1 gab.
3.	Akrila plaukts- atbalsts	1 gab.
4.	Manipula 1	1 gab.
5.	Manipula 2	1 gab.
6.	Manipula 3	1 gab.
7.	Karboksiterapijas manipulas	1 gab.
8.	Vibromasāžas rokturis	1 gab.
9.	Lietošanas pamācība	1 gab.
10.	Transporta kaste	1 gab.

1.2 Aparāta tehniskie dati

Mašīnas funkcijas	RF pacelšana; neinvazīva karboksiterapija; vibrācijas masāža;
Ādas temperatūras	kontroles temperatūras sensors
<i>RF-Lifting</i>	
HP enerģija	15-40 J/cm ²
Signāla frekvence Manipula 1 Manipula 2 Manipula 3	2 MHz 1 MHz 0,5 MHz
Jaudas līmeņi	1 – 17
Procedūras laiks	1 - 99 minutes
<i>Karboksiterapijas</i>	
Mehānisko vibrāciju biežums	50 MHz
Procedūras laiks	1 - 99 minutes

<i>Ierīces parametri</i>	
Voltage	220-240 V
Barošanas spriegums	50 - 60 Hz
Frekvence elektrotīklu	45W
Aizsardzības klase	IP31
Aparata gabarīta izmēri	455 mm*370 mm*200 mm
Svars (bruto)	6,65 kg

1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas



Galvenās aparātss sastāvdaļas, kā parādīts attēlā iepriekš:

1. PX-4000+ galvenā vienība;
2. Akrila plaukts-atbalsts;
3. Manipula 1;
4. Manipula 2;
5. Manipula 3;
6. Karboksiterapijas manipulas;

7. Strāvas vads;
8. Lietošanas pamācība.

1.4 Uzraudzība/pievienošana un aksesuāri

Lai instalētu px-4000+ mašīnu, rīkojieties šādi:

1. Izpakojiet ierīci, pārliedzinieties, vai visas sastāvdaļas ir pieejamas.
2. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas.
3. Savienojiet aparātu ar elektrotīklu, izmantojot strāvas vadu. Kontaktligzdai jābūt iezemētai!
4. Savienojiet rokturus ar pareizajiem savienotājiem ierīces aizmugurējā panelī:
 - Manipula 1 uz "Bi-polar" savienotāju;
 - Manipula 2 uz "sejas" savienotāju;
 - Manipula 3 uz "ķermeņa" savienotāju.
 - Karboksiterapijas manipula savienotājam.
5. Pārliedzinieties, ka visi savienojumi ir stingri ieviesti.
6. Ieslēdziet ierīci, nospiežot slēdzi ierīces aizmugurē uz pozīciju "1".
7. Nospiediet barošanas pogu ierīces priekšējā panelī.
8. Nospiediet "Enter", lai ievadītu galveno izvēlni.



Bi-polar HP1 variants:

Nospiediet "Bi-polar" galvenajā Menu, ekrāns stāsies procedūras izvēlnē.



Noteikt procedūras laiks (1 - 100 minūtes) "Set time", HP intensitāte (1 - 10) "Set intensitāte" un kontrolēt temperatūru "SET CT" (kad kontroles temperatūra, tiek sasniegts, brīdinājuma skaņas signāls, kas tiek izvirzīts), izmantojot "+-" pogas. Tagad aparāts ir gatavs darbam. Nospiediet Sākt, lai sāktu procedūru / nospiediet Stop, lai pārtrauktu procedūru. Nospiediet Iziēt (1), lai ievadītu iepriekšējo izvēlni.

HP 2 sejas pacelšanas variants:



Noteikt procedūras laiks (1 - 100 minūtes) "Set time", HP intensitāte (1 - 10) "Set intensitāte" un kontrolēt temperatūru "SET CT" (kad kontroles temperatūra, tiek sasniegts, brīdinājuma skaņas signāls, kas tiek izvirzīts), izmantojot "+-" pogas. Tagad aparāts ir gatavs darbam. Nospiediet Sākt, lai sāktu procedūru / nospiediet Stop, lai pārtrauktu procedūru. Nospiediet Iziēt (1), lai ievadītu iepriekšējo izvēlni.

HP 3 variants (ķermeņa pacelšana):



Noteikt procedūras laiks (1 - 100 minūtes) "Set time", HP intensitāte (1 - 10) "Set intensitāte" un kontrolēt temperatūru "SET CT" (kad kontroles temperatūra, tiek sasniegts, brīdinājuma skaņas signāls, kas tiek izvirzīts), izmantojot "+-" pogas. Tagad aparāts ir gatavs darbam. Nospiediet Sākt, lai sāktu procedūru / nospiediet Stop, lai pārtrauktu procedūru. Nospiediet Iziēt (1), lai ievadītu iepriekšējo izvēlni.

Karboksiterapijas funkcija

Lai izvēlētos karboksiterapijas funkciju, ekrāna galvenajā izvēlnē nospiediet «CarboMed». Ekrānā tiks ievadīta karboksiterapijas opcija, kā parādīts zemāk:



Iestatiet seansa laiku (no 1 līdz 60 minūtēm) - «Time»,

Ar «+ -» palīdzību iestatiet manioulācijas intensitāti (no 1 līdz 10) - «Intensity».

Lai pārbaudītu kopējo ekspluatācijā pavadīto laiku minūtēs - «Total time».

Lai aktivizētu stimulācijas vietas apgaismojumu, nospiediet «ON», lai izslēgtu vietas apgaismojumu, nospiediet «OFF».

Tagad iekārta ir gatava darbam.

Nospiediet «Start», lai sāktu seansu.

Nospiediet «Stop», lai pārtrauktu seansu.

Lai sāktu vibrācijas masāžu pēc karboksiterapijas procedūras pabeigšanas, uz tukšās plastmasas vienreizējās lietošanas kapsulas uzlieciet vibrācijas masāžas sprauslu, iestatiet ekspozīcijas intensitāti, procedūras laiku un nospiediet pogu «Start».

1.5 Darbības brīdinājumi, un norādījumi

1. Savienojiet rokturus ar galveno ierīci tikai tad, kad aparāts ir izslēgts.

2. Aizliegts noslaucīt ierīces akrila daļas ar spirtu saturošiem šķidrumiem vai mazgāšanas līdzekļiem.

3. Nelietojiet dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hlora sastāvdaļas.

5. Neuzstādiel pie siltuma avotiem. Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem.

6. Neļaujiet šķidrumiem, želejām utt. sip uz rokturi vai aparata ieejas savienotāji.

7. Darbības laikā, saglabāt brīvo spriedzi rokturu vadiem.

Izvairieties lieces vadus.

8. Pirms un pēc procedūras jādezinficē ierīces daļas, kas nonāk saskarē ar klienta ķermeni (apstrādes roktura gals).

9. Veiciet procedūru tikai ar nepieciešamajiem ādas kopšanas līdzekļiem, kas ražoti šāda veida procedūrai.

10. Aparātu izmanto skaistumkopšanas salonu telpās temperatūras diapazonā no + 10 līdz + 35 ° C un relatīvā mitruma līdz 80%. Ir aizliegts izmantot ierīci hidroterapijas telpās;

11. Ir aizliegts labot un uzturēt ierīci ārpus pilnvarotajiem servisa centriem.

12. Pēc transportēšanas zemā temperatūrā pirms darbības uzsākšanas ierīce jāuzglabā vismaz 3 stundas temperatūrā no + 10 līdz + 35 ° C.

13. Darbības laikā, aizliegts pieskarties metāla daļas citu iekārtu, kas darbina ēkas elektroapgādes tīklu, kā arī metāla daļas, kas ir iezemētas vai ir liela jauda attiecībā pret zemi.

14. Esiet piesardzīgs klientiem ar termisko jutību un jutību pret elektrisko strāvu.

15. Nav atļauts veikt procedūru ķermeņa zonās, kurās ir metāla implantu un citi metāla priekšmeti.

16. Nav atļauts veikt procedūru klientiem ar elektrokardiostimulatoriem.

17. Ir aizliegts ierīci darbināt tajā pašā telpā ar citu darba SHF vai UHF terapijas aprīkojumu.

18. Ir aizliegts izmantot darba rīkus, kas nav iekļauti iepakojuma saturā.

19. Nedarbiniet aparātu ar bojātu korpusu, strāvas vadu, rokturu vadiem vai darba rīku pati.

20. Pirms procedūras klientam un kosmetologam ir jānoņem visi rotaslietas (pulksteņi, auskari, kaklarotas utt.).

1.6 Sterilizācija/dezinfekcija

Radiofrekvences manipulas:

1. Pēc katras seanses visas detaļu plastmasas daļas un elektrodus notīriet ar mīkstu salveti, kas samitrināta ar ziepjūdens šķīdumu, un dezinfekcijai jāizmanto bez alkohola un nerūsējošs metāls un plastmasa (dezinfekcijai jāizmanto 20% hlorheksidīna šķīdums ir atļauts). Tās daļas, kuras bija saskarē ar klientu, pēc katra klienta jānotīra, izmantojot ierīces, kas nonāk saskarē ar ādu, dezinficēšanas metodes.

2. Nelietojiet dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hlora komponentus.

Karboksiterapijas manipulas

1. Rokturu var dezinficēt, neradot metālu un plastmasas koroziju, apstrādes laiks - 5 minūtes.

2. Nelietojiet dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hlora komponentus.

3. Lai notīrītu un dezinficētu vibrācijas masāžas sprauslu, vispirms noslaukiet to ar mīkstu sūkli ar ziepjūdens šķīdumu un pēc tam apstrādājiet ar hlorheksidīna šķīdumu.

1.7 Uzturēšana un kopšana

1. Aparātu virsmastīrīšanai, noslaukiet to ar mīkstu kokvilnas drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni vai ziepjūdeni.
2. Pagrieziet regulatorus, ar mērenu intensitāti.
3. Pavadīt regulāru telpās uzkopšanu, lai izvairītos no putekļiem, kas var novest pie izejas no aparāta darba stāvokļa.
4. Pirms darbu uzsākšanas, pārliedzinieties, ka tajā nav mehānisku bojājumu, vadi, ultraskaņas manipulas, aparātu korpusa un pareizību savienojumu ultraskaņas manipulas.

Gadījumā, ja radusies jebkuru defektu, ieteicam nekavējoties pārtraukt ierīces lietošanu un sazināties ar ar klientu apkalpošanas centru.

2. Garantijas pienākumi

2.1 Vispārīgie noteikumi

Šī garantija ir derīga tikai tad, ja garantijas talons ir pareizi aizpildīts – pārdēvēja zīmogs un pārdošanas datums. Garantijas laiks izstrādājumi skaitāms no pirkuma datuma. Garantijas nosacījumi ir spēkā saskaņā ar Likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību", reglamentē tās valsts tiesību aktiem, un tie nekādā veidā neietekmē ierobežo patērētāju tiesības. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētajos apstākļos.

Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteikta garantija.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

- ja prece tiek izmantota mērķiem, kuriem ražotājs vai piegādātājs garantiju nav paredzējis;
- ja prece tiek izmantota, neievērojot instrukcijā norādītos brīdinājumus vai mērķiem, kam tā nav paredzēta;
- ja uz preces ir redzamas patstāvīgi veikta remonta pazīmes vai ir veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
- ja ir mainīts, dzēsts vai nav nosakāms preces sērijas numurs;
- ja precei ir ārējās ietekmes izraisīti bojājumi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījis pats klients, stihiska nelaime, ugunsgrēks, sabiedriskie faktori, neparedzēti ārējie apstākļi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, ko izraisījusi nestandarta un sliktas kvalitātes materiālu, rezerves daļu, piederumu un aksesuāru izmantošana.

Garantija neattiecas uz trūkumiem (defektu) izstrādājumi, ko izraisa šādu iemeslu dēļ: dabīgo nolietojumu dēļ daļam, kurām ir ierobežots kalpošanas laiks, kā arī palīgmateriālu (baterijas, cimdi mikrostrāvas, aprobe presoterapijas un tā tālāk),

bojājumiem, kas ir radušies nepareizi vai pavirši lietošanu, uzglabāšanu, apkopi, iekārtu, darbību un ļaunprātīgi vai nepareizi montāžu, ja prece tika izmantota neparedzētajos apstākļos;

Garantijas apkalpošana neatteicas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti;

Ja ir mehāniskie bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;

2.2 Ražotāja Garantija

Ražotāja garantija attiecas, ja tas atbilst noteikumiem un nosacījumiem, ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

1. Garantija 18 mēnešiem attiecas tikai uz iekšējo komplektācijā aparātu;
2. Garantija 6 mēneši attiecas tikai uz uzgaļa un ārējie piederumi (izņemot atrinolietajamās daļas un palīgmateriālu).

2.3 Piegādes noteikumi

Piegāde un nosūtīšana no garantijas centra notiek uz pircēja rēķina.

2.4 Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem

Ar kosmetoloģijas aparātiem nav tā sastāvdaļas, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un piesārņo vidi.

Pēc ekspluatācijas termiņa beigām tās var pārstrādāt bez īpašas metodes pārstrādi.

Komplektējošie izstrādājumi (čipsi, rezistori, kondensatori un tā tālāk), kas pēc ekspluatācijas termiņa ir darbības stavoklī, var izmantot kā rezerves daļas, rezerves daļas, lai veiktu remontu šādu un līdzīgu aparātu.

2.5 Pārstāvniecības

Valsts:	Adrese:	Telefons:
Čehija	Prague 5, Štefánikova 18/25 15000	+420 (228) 880691
Ukraina	Kijevā, v Jeļenas Телиги, 5-В	+38 (068) 568 83 66 0 (800) 33 98 14
Krievija	Maskavas, Rjazaņas rp t, tālāk 10, lapa 2	+7 (800) 250 5459
Latvija	Rīga, Madonas iela 21-85	+371 (2) 212 1543